

DAB's GUIDE för driftsuppehåll

Nedan följer några allmänna tips att tänka på när kliniken ska vara stängd en längre tid och likaså när du startar upp den efter ett längre uppehåll.

I första hand gäller förstås tillverkarnas bruksanvisningar och era egna hygien- och skötselrutiner.

STÄNGA NER

BEHANDLINGSRUM

Behandlingsutrustning

- > Spola igenom instrumentslangarna.
- Har du desinfektionssystem - använd programmet för daglig rengöring.
- > Plocka bort alla instrument m.m. du normalt rengör mellan varje patient och hantera dem som du brukar.
- > Rengör sugsystemet.
Sugslangar, sugsilar & fontänskål + ev. uppsamlingskål amalgamavskiljare.
- > Desinficera alla ytor
- > Stäng av utrustningen.
- > Stäng av huvudströmbrytaren för el och kranar för vatten & luft

MASKINRUM

När rengöring & desinficering av behandlingsutrustningen är klar:

Kompressor

- > Stäng av kompressorn.
- Passa även på att tömma tanken på ev. kondensvatten
- > Töm tanken på ev. kondensvatten.

Sugmotor / Sugsystem

- > Rengör eventuellt avskiljarsystem
- > Stäng av sugmotorn

STERILRUM

När alla instrument etc. är rengjorda, desinficerade, autoklaverade och smorda:

Autoklav

- > Stäng av autoklaven.
- > Torka ur kammaren.
- > Har du vattentank i autoklaven bör den tömmas & torkas ur.
- > Har du direktansluten vattenförsörjning - stäng berörda kranar & strömbrytare.

Diskdesinfektor & Instrumentskötsel (t.ex. DAC)

- > Stäng av ström- och vattenförsörjning
- > Torka ur kammaren och gör ren eventuella filter.

Ultraljudsbad

- > Dra ut strömkabeln
 - > Töm och torka ur behållaren.
-

STARTA UPP

MASKINRUM

Kompressor & Sugsystem

- > Slå på strömmen till kompressor och sugsystem.
- > Vänta gärna så du hör att enheterna låter normalt och att kompressorn slår ifrån när den fått upp trycket i tanken.

STERILRUM

Autoklav & Instrumentskötsel

- > Beroende av vattenförsörjningssystem; Fyll på avjoniserat vatten alt. öppna kranarna till och aktivera avjoniseringssystemet.

Diskdesinfektor

- > Koppla på el & vatten.

Ultraljudsbad

- > Anslut elen och fyll på behållaren.

BEHANDLINGSRUM

Behandlingsutrustning

- > Slå på huvudströmbrytare och öppna kranar för luft & vatten till behandlingsrummet.
- > Slå på strömbrytaren på behandlingsutrustningen.
- > Spola igenom instrumentslangarna.
- Har du desinfektionssystem - använd programmet för månadsrengöring/intensivrengöring.

GENERELLT

- > Var extra uppmärksam på missljud och eventuella läckage av luft & vatten.
 - > Ställ in tid & datum.
-